

ИНСТРУКЦИЯ **по применению медицинского изделия**

Средство абсорбирующее кровоостанавливающее стерильное **REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14**

Описание

REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 – высокоэффективное кровоостанавливающее средство на основе высокомолекулярного полимера природного происхождения. Представляет собой слабо гигроскопический, мелкий порошок желтого или желто-белого цвета, без запаха. REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 – стерильный гемостатический порошок для наружного применения.

Содержимое упаковки

Порошок в пакетах по 20 г (г), 30 г (г), 40 г (г), 50 г (г), 60 г (г).

Состав REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14:

Порошок 10 г (г) содержит:

Камедь рожкового дерева 9,6 г (г);

Кальция глюконат 0,4 г (г).

Показания к применению

REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 предназначен для остановки наружного кровотечения разной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов, преимущественно на догоспитальном этапе. REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 может быть использован в клинических, полевых условиях и в быту.

Механизм действия

При взаимодействии порошка с кровью, REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14, за счет большой молекулярной массы молекул, насыщенных гидроксильными группами, образует водородные связи с водой (составляет 90–95 % крови), что приводит к агрегации форменных элементов крови и факторов свертывания в месте контакта с последующим образованием кровяного сгустка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам изделия.

Способ применения и дозы

Перед применением REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 очистить рану от инородных тел и кровяных сгустков для обеспечения максимального контакта порошка с поврежденным сосудом. REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 применяется путем засыпания порошка непосредственно в источник кровотечения.

Промокните ранение бинтом или каким-либо другим доступным материалом.

Заполните рану содержимым пакета. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ!**

Плотно прижмите к ране бинт или марлевый тампон в течение 5 минут. Если кровотечение не останавливается, удерживайте еще 5 минут.

Примечание. При сильных кровотечениях утрамбовать порошок в рану любым доступным способом, чтобы избежать вымывания порошка током крови.

Если ранение большое, и для его заполнения одного пакета недостаточно, возьмите еще один пакет.

Наложите на рану давящую повязку.

Как можно быстрее доставьте потерпевшего в ближайший пункт первой медицинской помощи.

Передайте пустой пакет медицинским работникам.

Не используйте остатки порошка.

Информация для медицинского персонала

1. Тщательно очистить рану.
2. Остатки изделия удалить из раны путем тщательного промывания раны теплым 0,9 % раствором натрия хлорида до полного удаления кровяных сгустков, остатков изделия и других инородных тел.
3. Провести обработку раны согласно стандартным утвержденным клиническим протоколам.

Побочные реакции

Аллергические реакции.

Надлежащие меры безопасности при применении

Упаковку REVUL® (РЕВУЛ®) исполнение №14 раскрыть непосредственно перед применением, средство повторному использованию не подлежит.

Проверяйте срок годности и целостность упаковки перед использованием. При повреждении первичной упаковки изделие не использовать!

Изделие только для наружного применения. Избегайте попадания в дыхательные пути и в глаза. При попадании в глаза немедленно смойте большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.



Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +30 °С.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10





Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08








Адрес производства

Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 21

www.uf.ua

www.revul.com.ua

| Графические символы и их разъяснения | |
|---|--|
|  | ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЯМ И КОД ОРГАНА ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ |
|  | THE SYMBOL OF METHOD OF STERILIZATION, DURING WHICH STEAM IS USED/МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗЛУЧЕНИЕ |
|  | DO NOT RE-USE/ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО |
|  | MANUFACTURE/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |

| | |
|---|---|
|  | DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED/НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ |
|  | TEMPERATURE LIMIT/ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ |
|  | CAUTION, CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ |
|  | CONSULT INSTRUCTION FOR USE/ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
|  | DATE OF MANUFACTURE/ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ |
|  | USE-BY DATE/ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО |
| партия  | BATCH CODE/КОД ПАРТИИ |

Дата последнего пересмотра: 21.12.2018 г.

Версия: 02