

ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу

Засіб абсорбуючий кровоспинний стерильний REVUL® (РЕВУЛ®)

Опис

REVUL® (РЕВУЛ®) – високоефективний кровоспинний засіб на основі високомолекулярного полімеру природнього походження. Являє собою слабо гігроскопічний, дрібний порошок жовтого або жовто-білого кольору, без запаху. REVUL® (РЕВУЛ®) – стерильний гемостатичний порошок для зовнішнього застосування.

Вміст пакування

Виконання 14, 30 g (г), у пакеті.

Склад: порошок 10 g (г) містить:

Камедь рожкового дерева 9,6 g (г)
Кальцію глюконат 0,4 g (г)

Показання

REVUL® (РЕВУЛ®) призначено для зупинки зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих венозних і артеріальних судин, переважно на догоспітальному етапі. REVUL® (РЕВУЛ®) може бути використаний в клінічних, польових умовах і в побуті.

Механізм дії

При взаємодії порошку з кров'ю, REVUL® (РЕВУЛ®), за рахунок великої молекулярної маси молекул, які насичені гідроксильними групами, утворює водневі зв'язки з водою (складає 90-95 % крові), що призводить до агрегації формених елементів крові та факторів згортання в місці контакту з наступним утворення кров'яного згустку.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів виробу.

Спосіб застосування та дози

1. Перед застосуванням REVUL® (РЕВУЛ®) очистіть рану від сторонніх тіл і кров'яних згустків для забезпечення максимального контакту порошку з пошкодженою судиною. REVUL® (РЕВУЛ®) застосовується шляхом засипання порошку безпосередньо до джерела кровотечі.
2. Перевірте термін придатності і цілісність упаковки медичного виробу.
3. Промокніть поранення бинтом або будь-яким іншим доступним матеріалом.
4. Відкрийте пакет.
5. Заповніть рану вмістом пакета. НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ПАКЕТ!
6. Щільно притисніть до рани бинт або марлевий тампон протягом 5 хвилин. Якщо кровотеча не спиняється, утримуйте ще 5 хвилин.

Примітка: При сильних кровотечах утримувати порошок в рану будь-яким доступним способом, щоб уникнути вимивання порошку потоком крові. Якщо поранення велике, і для його заповнення одного пакету недостатньо, візьміть ще один пакет.

7. Накладіть на рану тиснучу пов'язку.



8. Якомога швидше доставте потерпілого до найближчого пункту першої медичної допомоги.
9. Передайте порожній пакет медичним працівникам.
10. Не використовуйте залишки порошку.

Інформація для медичного персоналу

1. Ретельно очистити рану.
2. Залишки виробу видалити з рани шляхом ретельного промивання рани теплим 0,9 % розчином натрію хлориду до повного видалення кров'яних згустків, залишків виробу та інших сторонніх тіл.
3. Провести обробку рани згідно стандартним затвердженим клінічним протоколам.

Побічні реакції

Реакції підвищеної чутливості.

Належні заходи безпеки при застосуванні

Упаковку REVUL® (РЕВУЛ®) розкривати безпосередньо перед застосуванням, засіб повторному використанню не підлягає.

Не використовувати виріб якщо закінчився термін придатності.

Не використовувати виріб при пошкодженні первинної упаковки.

Виріб лише для зовнішнього застосування. Уникайте потрапляння у дихальні шляхи та в очі. При потрапленні в очі негайно змийте великою кількістю води.

Термін придатності: 3 роки.



Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +5 °С до +30 °С.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua


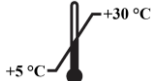





www.uf.ua

www.revul.com.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13.

Графічні символи та їх роз'яснення	
	Conformity mark to the Technical regulation for medical devices and the code of the conformity assessment body/Знак відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів та код органу з оцінки відповідності
	Sterile. Sterilized using irradiation/Стерильно. Стерилізовано з використанням опромінення
	Do not re-use/Не використовувати повторно
	Manufacturer/Виробник
	Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки



	Humidity limitation/Обмеження вологості
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Caution/Засторога
	Consult instructions for use/Ознайомлення з інструкціями із застосування
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Use-by date/Не застосовувати після
<p>партія</p> 	Batch code/Код партії

Дата останнього перегляду: 23.02.2021 р.
Версія: 03.

